



Oxivir Sporicide CE

Reiniger en desinfectant voor niet-invasieve medische hulpmiddelen

Omschrijving

Diversey Oxivir Sporicide CE is een eenstaps reinigings- en desinfectiemiddel effectief tegen *Clostridium difficile* en *Bacillus subtilis*. Oxivir Sporicide Wipe CE is gebaseerd op Diversey's gepatenteerde AHP (Accelerated Hydrogen Peroxide) formulering en kan worden gebruikt op niet-invasieve medische hulpmiddelen.

Eigenschappen

- Effectief tegen ***C difficile*** in 1 minuut*
- Sporicide, Bactericide, Virusdodend, Gistdodend, Schimmeldodend, in slechts 1 minuut
- Positief gebruikers- en oppervlakte veiligheidsprofiel, vergeleken bij andere sporicides
- Effectieve reiniger
- Geurloos
- Breekt actief af in water en zuurstof - Laat geen actieve residuen achter op het oppervlak
- Bevat geen chlorine of alcohol

Voordelen


- Uitstekende reactie op ***C difficile*** uitbraak
 - Brede effectiviteit tegen alle andere pathogene klassen bieden de hoogste niveaus van patiëntbescherming
 - Korte contacttijden zorgen dat het oppervlak vochtig blijft waardoor de desinfectie-effectiviteit wordt verzekerd
 - Naspoelen niet nodig
 - Veroorzaakt geen irritatie aan de luchtwegen
 - Geschikt voor gebruik in hoge risico gebieden in Gezondheidszorg, waaronder ICU, NICU, patiënten- en isolatiekamers
 - Schuimtrigger zorgt voor efficiënte toepassing
- Niet** bedoeld voor gebruik op invasieve medische apparaten

Gebruiksaanwijzing

Sprayreiniging en desinfectie:

1. Verwijder grove vervuiling.
2. Breng op het oppervlak aan door middel van het sprayen op een reinigingsdoek en over het oppervlak te vegen, of door het direct op het oppervlak aan te brengen door middel van een schuimtrigger.
3. Na de contacttijd * & ** het oppervlak droogvegen of aan de lucht laten drogen.

CE 0044

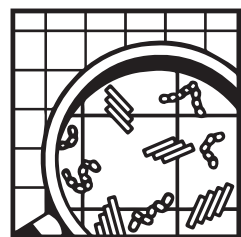

° A.I.S.E.

**De dosering is gebaseerd op optimale omstandigheden, aanbevelingen kunnen variëren. Raadpleeg uw contactpersoon bij Diversey voor advies.*



Oxivir Sporicide CE

Dry Wipes Disposable Doekjes Systeem:

1. Bereid het Dry Wipes Disposable Doekjes Systeem voor zoals aangegeven op de verpakking.
2. Verwijder grove vervuiling.
3. Neem een doekje uit de verpakking en veeg over het oppervlak.
4. Na de contacttijd * & ** het oppervlak droogvegen of aan de lucht laten drogen.
5. Vervang het doekje wanneer deze zichtbaar vervuild is of verplaats naar een volgend reinigingsgebied.

* Indien gebruikt als terminaal desinfectiemiddel volgens bovenstaand reinigingsplan

**Zorg voor een voortdurend vochtige ondergrond tijdens de contacttijd

Technische gegevens

Uiterlijke kenmerken: Heldere, kleurloze vloeistof

pH-waarde (in gebruik): 2.7 ± 0.3

Relatieve dichtheid: 1.03265

Houdbaarheid: 720 dagen

Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden en dienen niet te worden opgevat als specificaties.

Informatie over veilige hantering en opslag

De volledige instructies voor het hanteren en het verwijderen van dit product zijn te vinden in een afzonderlijk Veiligheidsinformatieblad (SDS). <https://sds.diverse.com/>. Opslaan in de originele, gesloten verpakking en niet blootstellen aan extreme temperaturen. Alleen voor professioneel gebruik.

Reageert met oxideerbare stoffen.

Productcompatibiliteit

Niet mengen met andere producten. Niet gebruiken op water- en zuurgevoelige oppervlakken. Bij het gebruik van Oxivir Sporicide CE dienen handschoenen te worden gedragen.

Microbiologische gegevens

Effectiviteit is bewezen in compliance met: EN13727, EN13624, EN13697, EN14476, EN13704, EN14348 and EN16615.

Milieu-informatie

De oppervlakte-actieve bestanddelen die gebruikt worden in dit product zijn biologisch afbreekbaar in overeenstemming met de EU wetgeving voor reinigingsmiddelen, EC 648/2004.

Beschikbare verpakkingen

Oxivir Sporicide is verkrijgbaar in een flacon met schuimtrigger, 6x0.75L